

**IMBRAGATURA LEGGERA DI SICUREZZA A 6
TIRANTI (MOD. RAGNO)
(cod. 704)****Nome Prodotto**

IMBRAGATURA LEGGERA DI SICUREZZA A 6
TIRANTI (MOD. RAGNO)
(cod. 704)

REF	Misura	Colore
704	Unica	Blu, Nero (secondo disponibilità)

Vestibilità: fino a 170 cm

**Destinazione d'Uso**

La cintura è indicata per pazienti costretti alla carrozzina o seduta per mantenere una postura del tronco eretta evitando che scivolino in avanti. Regolabile tramite le sei fibbie in plastica di cui sono muniti i tiranti.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Imbottitura in MTP: vellutino 100% poliammide o poliestere (come da etichetta composizione), interno 100% poliuretano base etere.

Gallone: 100% cotone.

Fibbia: tridente in plastica acetilica con resistenza fino a 100 kg.

Istruzioni per l'Uso

1. Posizionare il supporto sulla seduta facendo passare i 2 tiranti tra lo schienale e la seduta
2. Fare sedere il paziente
3. Appoggiare il gallone (con l'etichetta) sul ventre del paziente e regolare la tensione sul retro della carrozzella con la fibbia di plastica a scatto.
4. Portare i rimanenti 2 galloni sul retro facendoli passare sulle spalle del paziente.
5. Fissare e regolare la tensione con le fibbie a scatto dei 6 galloni.

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.

**IMBRAGATURA LEGGERA DI SICUREZZA A 6
TIRANTI (MOD. RAGNO)
(cod. 704)**

Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Pettorale → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y122406

Codice EMDN: Y122406

Codice BD/RDM: 2521240

Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745

Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902