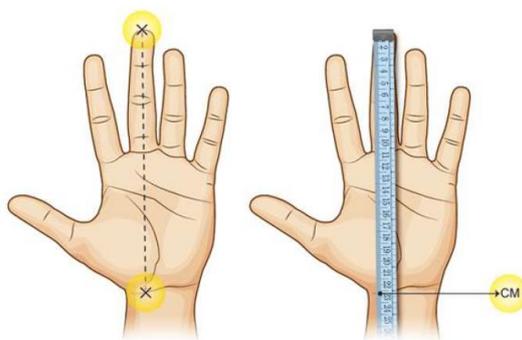


**MANOPOLA IMBOTTITA DI PROTEZIONE
(cod. 705)****Nome Prodotto**MANOPOLA IMBOTTITA DI PROTEZIONE
(cod. 705)

REF	Taglie (*)	Colore
705	M (fino a 19 cm)	Bianco
	L (da 20 cm)	

Confezione: al paio

(*)
per stabilire la giusta taglia dei guanti, misurare la mano partendo dalla punta del dito medio fino al palmo della mano (escludendo il polso)

**Destinazione d'Uso**

Le manopole sono indicate per pazienti agitati che possono quindi recare danno a sé stesso o alle persone a lui vicine. Le manopole quindi evitano possibili danni a persone e/o a cose.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Imbottitura interna: 100% fibra cava siliconata

Esterno: 100% cotone e MTP composto esternamente da 100% poliammide ed internamente 100% poliuretano base etere.

Istruzioni per l'Uso

1. Inserire la mano nell'apposita tasca del guanto con il palmo rivolto verso la parte imbottita.
2. Chiudere il polso con l'apposita fascia in velcro.

In caso di pazienti molto agitati utilizzare il tirante con la fibbia per fissare la mano al letto.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non stirare.

**MANOPOLA IMBOTTITA DI PROTEZIONE
(cod. 705)**

Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Manopole → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030599

Codice EMDN: M030599

Codice BD/RDM: 2521243

Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745

Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902