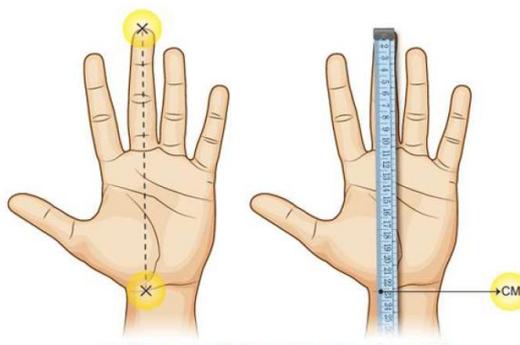


**MANOPOLA ANTIPRESA DI PROTEZIONE**  
(cod. 706R)**Nome Prodotto**MANOPOLA ANTIPRESA DI PROTEZIONE  
(cod. 706R)

REF	Taglie (*)	Colore
706R	M (fino a 19 cm)	Bianco
	L (da 20 cm)	

Confezione: al paio

(\*)  
per stabilire la giusta taglia dei guanti, misurare la mano partendo dalla punta del dito medio fino al palmo della mano (escludendo il polso).

**Destinazione d'Uso**

Le manopole sono indicate per pazienti agitati che possono quindi recare danno a se stesso o alle persone a lui vicine. Le manopole quindi evitano possibili danni a persone e/o a cose.

Sul palmo una lastra di polietilene impedisce la presa del paziente per impedire ad esempio di sfilarsi sondini, catetere, flebo, ecc.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Imbottitura interna: 100% fibra cava siliconata.

Esterno: 100% cotone e MTP composto esternamente da 100% poliammide ed internamente 100% poliuretano base etere.

Lastra Interna: 100% polietilene.

**Istruzioni per l'Uso**

1. Inserire la mano nell'apposita tasca del guanto con il palmo rivolto verso la parte imbottita.
2. Chiudere il polso con l'apposita fascia in velcro.

In caso di pazienti molto agitati utilizzare il tirante con la fibbia per fissare la mano al letto.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Manopole → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: M030599

Codice EMDN: M030599

Codice BD/RDM: 2521244



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902

