

**CUNEO DIVARICATORE PER
CARROZZELLA E LETTO
(cod. 708)****Nome Prodotto**CUNEO DIVARICATORE PER
CARROZZELLA E LETTO
(cod. 708)

REF	Misure (cm)	Colore Fodera
708	Base Piccola: ~ 15 x 12 Base Grande: ~ 15 x 23 Altezza: ~ 15 Lunghezza Fascia: ~ 117	Divaricatore: Blu Fascia: Crema



Confezione da 1 pezzo.

Destinazione d'Uso

Dispositivo indicato per i pazienti costretti a letto o su carrozzella o poltrona per mantenere in sicurezza le gambe in posizione divaricata.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e MaterialiAnima: 100% poliuretano elastico e indeformabile con densità pari a 18 Kg/m³ (± 5%)

Fodera: 100% cotone tipo jersey

Fascia: 100% poliuretano espanso base etere

Istruzioni per l'Uso

Posizionare il cuneo fra le cosce o i polpacci fissandolo con gli appositi tiranti.

Utilizzare sopra ad un capo di abbigliamento per evitare un diretto contatto con la pelle.

Seguire eventuali indicazioni da parte del personale sanitario.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura della fodera della fascia. Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

L'anima interna col tempo può assumere un colore che vira al giallo dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di polietilene.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Cuneo Divaricatore → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y122499

Codice EMDN: Y122499

Codice BD/RDM: 2523371



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902