

**TALLONIERA IMBOTTITA (CONF. 2 PZ.)
(cod. 710)****Nome Prodotto**TALLONIERA IMBOTTITA (CONF. 2 PZ.)
(cod. 710)

REF	Taglia	Colore
710	Unica	Blu, Nero (secondo disponibilità)

Confezione da 2 pezzi.

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per la prevenzione e la cura delle piaghe da decubito.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Imbottitura:

100% Fiocco in Fibra Cava. Denier: 7 x 32 mm V.

Rivestimento Esterno:

Vellutino 100% poliammide o poliestere (come da etichetta composizione), interno 100% poliuretano base etere.

Rivestimento Interno:

100% Cotone.

Istruzioni per l'Uso

Posizionare le talloniere seguendo la linea del piede ed usando i velcri per assicurare il piede all'interno della talloniera.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Non porre a diretto contatto con l'epidermide lesa.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**TALLONIERA IMBOTTITA (CONF. 2 PZ.)
(cod. 710)****Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Talloniere → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0811

Codice EMDN: V0811

Codice BD/RDM: 2537963



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902