

**CINGHIA ALZA MALATI CON MANIGLIE
LATERALI E DORSALI
(cod. 715)****Nome Prodotto**CINGHIA ALZA MALATI CON MANIGLIE
LATERALI E DORSALI
(cod. 715)

REF	Taglia / Misura Girovita	Colore
715	M (75 / 95 cm)	Crema
	L (95 / 115 cm)	



Altezza: 10 cm.

Destinazione d'Uso

La cinghia è indicata come ausilio alla movimentazione di pazienti con ridotte capacità motorie.

Inoltre evita all'operatore che assiste tali pazienti di assumere posture errate con conseguente sovraccarico del rachide.

Se indossata anche dall'operatore garantisce sostegno al paziente.

Si consiglia l'utilizzo da parte di personale sanitario specializzato.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Gallone: 100% Cotone.

Velcro: Poliammide e Poliestere.

Borchie: lega in Nickel/Ottone.

Istruzioni per l'Uso

La cintura è realizzata in gallone di cotone, con la chiusura regolabile in velcro ed è dotata di due maniglie laterali ed una posteriore. Utilizzando le apposite maniglie l'operatore può spostare il paziente dal letto, dalla carrozzella, dalla barella dalla sedia o water. Le maniglie posteriori consentono a due operatori di spostare pazienti particolarmente pesanti.

Indossare come una cintura in vita.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**CINGHIA ALZA MALATI CON MANIGLIE
LATERALI E DORSALI
(cod. 715)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Cinghia → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V08050399

Codice EMDN: V08050399

Codice BD/RDM: 2523262



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902