

**CIAMBELLA GONFIABILE IN GOMMA DIAM.40 CM
(cod. 732)****Nome Prodotto**

CIAMBELLA GONFIABILE IN GOMMA

DIAM.40 CM

(cod. 732)

REF	Misure Diametro	Colori
732	40 cm	Arancione

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per evitare l'insorgere delle piaghe da decubito e per i decorsi post-operatori di emorroidi.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% Gomma.

Istruzioni per l'Uso

Svitare la valvola di gonfiaggio per metà della corsa, gonfiare con più o meno aria per ottenere il comfort desiderato e riavvitare la valvola. Non gonfiare completamente il prodotto tenendo presente che l'aria aumenta il volume con il calore. Si suggerisce di posizionarsi sulla ciambella in modo che il peso sia uniformemente distribuito evitando una pressione esagerata su un singolo punto. Il gonfiaggio eccessivo può provocare rotture e danneggiamenti irreversibili. Non appoggiarsi su un singolo punto del prodotto. Prodotto indicato per peso fino a 100 Kg.

Mettere la ciambella sul sedile della carrozzina o della seduta e sedervi sopra. Una volta finito l'uso, sgonfiarlo totalmente.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante. Non utilizzare aria compressa per il gonfiaggio.

Contiene Lattice. Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua fredda con detersivo neutro, sciacquare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non mettere in lavatrice.

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

STK-732

Rev.00

Data: 26/01/2024

Pag. 1 / 2

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica
Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta
Ciambella → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V080302

Codice EMDN: V080302

Codice BD/RDM: 2528977



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902