

**TELO TUBOLARE ALTO SCORRIMENTO IN NYLON
(cod. 740G)****Nome Prodotto**

TELO TUBOLARE ALTO SCORRIMENTO IN
NYLON
(cod. 740G)

REF	Colore
740G	Rosso
Misure ($\pm 3\%$)	
122 x 71 cm	

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per il posizionamento ed il trasferimento del paziente nel letto, oppure tra il letto-barella-carrozzina-auto, ecc. Questo dispositivo è dotato di una forma tubolare e di laccio utilizzabile per spostare il telino e movimentare l'utente con il minimo sforzo.

L'utilizzo dei teli ad alto scorrimento riduce lo stress fisico associato alle diverse operazioni di mobilitazione manuale del paziente riducendo lo sforzo fisico richiesto, incoraggiando l'assunzione di posture meno rischiose per l'operatore e migliorando in generale le condizioni di lavoro degli operatori di assistenza.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% Poliammide. Non contiene lattice.

Istruzioni per l'Uso

I teli tubolari scorrevoli sono un utile aiuto per svolgere le attività di riposizionamento dei pazienti in condizioni sfavorevoli e come complementi per l'esecuzione del trasferimento. È consigliabile l'utilizzo con l'asse di trasferimento Cod.742.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante. Portata massima 150 Kg.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Lattex Free.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare con un panno umido o a mano a bassa temperatura con detergente delicato ed asciugare lontano da fonti di calore. Se il caso passare con una soluzione di Amuchina o prodotto simile.

Non usare solventi e non candeggiare.

Non mettere in lavatrice e non stirare.

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Telo → Raccolta Plastica

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0899

Codice EMDN: V0899

Codice BD/RDM: 2518789



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902