

Nome Prodotto
ASSE PER TRASFERIMENTO
(cod. 742)

REF	Colore
742	Blu
Misure (± 3%)	
75 x 33 cm	



Destinazione d'Uso

Il dispositivo è indicato come asse di trasferimento da utilizzare nei passaggi letto carrozzina, bagno, auto, ecc. Il lato inferiore è dotato di strisce di materiale anti scivolo per una maggiore sicurezza.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Asse: 100% Composto Plastico Leggero.
Antiscivolo Inferiore: Gomma

Istruzioni per l'Uso

Posizionare l'asse come un ponte tra il luogo dove siede il paziente e il luogo dove si vuole trasferire seguendo le immagini riportate qui sotto.



Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Testato a 135 Kg con distanza massima tra i carichi di 10 cm.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare con un panno umido con detergente delicato ed asciugare lontano da fonti di calore.

Se il caso passare con una soluzione di Amuchina o prodotto simile.

Non usare solventi e non candeggiare.

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Asse → Raccolta Plastica

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0899

Codice EMDN: V0899

Codice BD/RDM: 2523271



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902