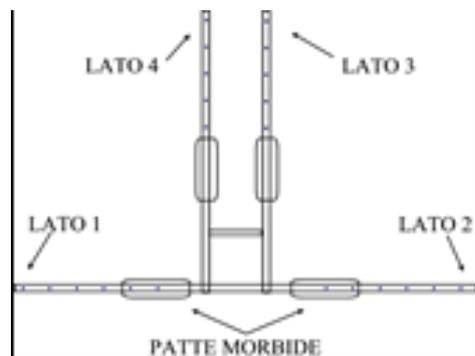


**BRETELLAGGIO PER CONTENIMENTO DEI
MOVIMENTI DEL TRONCO (per cod. 686)
(cod. 801)****Nome Prodotto**BRETELLAGGIO PER CONTENIMENTO DEI
MOVIMENTI DEL TRONCO (per cod. 686)
(cod. 801)

REF	Misura	Colore
801	Unica	Crema

**Immagine (A)****Immagine (B)****Destinazione d'Uso**

Il bretellaggio è indicato per pazienti costretti a letto ed incapaci di cooperare.

Impedisce le cadute accidentali dal letto e gli scivolamenti del paziente verso l'alto.

Il prodotto si adatta ESCLUSIVAMENTE al nostro articolo Cod.686 "Cintura contenimento letto doppio movimento".

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Imbottitura interna in MTP: vellutino esterno in 100% poliammide ed interno 100% poliuretano base etere.

Gallone (tiranti): 100% cotone.

Esterno: 100% cotone.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone



Necessari ma forniti a parte su richiesta:

bottoni 690M+chiave 691M

Istruzioni per l'Uso

La cintura Cod.686, deve essere già posizionata ed assicurata alla struttura del letto.

Eeguire il montaggio nel seguente modo:

1. Stendere il bretellaggio sul letto, come da Immagine (B).
2. Fare passare il "lato 1" nell'asola interna della cintura Cod.686 alla sua sinistra.
3. Fare passare il "lato 2" nell'asola interna della cintura Cod.686 alla sua destra.
4. Posizionare il paziente.
5. Posizionare "lato 3" e "lato 4" sul bacino del paziente, incrociare e fissare con un bottone alla cintura Cod. 686.
6. Fare passare il "lato 1" e il "lato 2" all'interno delle asole presenti su "3" e "4". È possibile fissare le estremità del lato 1 e 2 in un'unica asola e fissare con un bottone (fornito a parte assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M).
7. "3" e "4" devono essere posizionate sotto le ascelle del paziente.
8. Il prodotto correttamente applicato risulta come Immagine (A) se necessario è possibile assicurare il paziente alla struttura del letto inserendo la cintura supplementare con Cod.800 (venduto a parte) nei passanti in acciaio presenti su "3" e "4".

**BRETELLAGGIO PER CONTENIMENTO DEI
MOVIMENTI DEL TRONCO (per cod. 686)
(cod. 801)**

In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti o biancheria intima.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Per l'uso del prodotto e delle sue applicazioni è raccomandata la prescrizione medica.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Bretellaggio → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030599

Codice EMDN: M030599

Codice BD/RDM: 2523249



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902