

**Nome Prodotto**

FACE GUARD

(cod. 81457)

REF	Misura	Colore
81457	Unica	Trasparente



Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima dell'uso.

**Destinazione d'Uso**

Protezione per naso e viso dalle lesioni durante l'attività sportiva. Ottimale dispersione dell'energia di impatto. Livello di protezione massimo. La Mueller® Face Guard è realizzata in policarbonato infrangibile di grado medico per prevenire lesioni future. Può essere indossata durante il recupero da un infortunio al viso per proteggere quell'area. Tipicamente indossata quando si gioca a basket, baseball, calcio o altri sport. Ideale anche nel wrestling, karate e volley. Dispone di:

- Tirante occipitale: forma sicura, ottimo comfort, massima adattabilità
- Kit imbottitura in spugna: vestibilità su misura, maggior comfort, maggior protezione, migliore utilizzo.

Il dispositivo di protezione individuale in oggetto non è un gioco e non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Maschera: Policarbonato di qualità medica, a prova di rottura e incrinatura, visibilità perfetta, vestibilità ottima.

Imbottitura: spugna.

Non contiene lattice.

**Istruzioni per l'Uso**

1. Applicare l'imbottitura sulle aree desiderate della maschera in modo che quest'ultima si adatti bene
2. Posizionare delicatamente la maschera sul viso in modo che l'imbottitura sia in una posizione comoda
3. Tirare delicatamente la finitura elastica sulla testa per tenere la protezione in posizione corretta
4. Regolare le fasce elastiche secondo necessità

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Attenzione: se si sviluppa un'eruzione cutanea o il dolore persiste, interrompere l'uso e consultare il medico.

Dispositivo Non Sterile.

Seguire le istruzioni di lavaggio/pulizia.

Non utilizzare se la confezione e la maschera sono danneggiate.



Dispositivo non sterile.

### Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di pulizia dopo ogni utilizzo. Pulire delicatamente con un panno morbido o con prodotti dedicati per disinfettare. Non lavare in lavatrice.

### Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

### Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica e busta in TNT.

### Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Face Guard → Raccolta Plastica

### Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

### Altre Informazioni

Dispositivo di Protezione Individuale



Categoria I  
Regolamento (UE) 2016/425



Prodotto da: Mueller Sports Medicine, Inc.

1, Quench Drive, P.O. Box 99

Prairie du Sac, WI53578 - USA

1-800-356-9522 • 608-643-8530

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.muellersportsmed.com](http://www.muellersportsmed.com)



Distribuito da: Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Mueller Sports Medicine, Inc. ai recapitati sopra riportati.