

**ALZACUSCINO REGOLABILE  
CON POGGIATESTA**  
(cod. F0612)**Nome Prodotto**ALZACUSCINO REGOLABILE CON  
POGGIATESTA  
(cod. F0612)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>REF</b>                  |
| F0612                       |
| <b>Dimensioni (cm)</b>      |
| 58 x 54 x 47                |
| <b>Portata Massima (Kg)</b> |
| 120                         |

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è progettato per aiutare anziani e disabili a compiere funzioni come leggere o mangiare.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Struttura in acciaio verniciato regolabile in 5 posizioni. Rivestimento in nylon traspirante con poggiatesta imbottito. Colore: blu



Dispositivo Non Sterile

**Istruzioni per l'Uso**

Posizionare sul letto, regolare l'inclinazione con le 5 posizioni disponibili appoggiare il busto nel telino blu e il collo sul comodo cuscino.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Non interporre ostacoli oppure arti tra le due parti dello schienale. Lo schienale non deve essere usato da più persone contemporaneamente. Non utilizzare il prodotto se non perfettamente integro.

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.

Portata massima Kg 120.

Dispositivo Non Sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

**Conservazione**

Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica determina la durata di vita del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato.

**Tipo di Confezione**

Sacchetto di plastica.

**ALZACUSCINO REGOLABILE  
CON POGGIATESTA  
(cod. F0612)**

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Alzacuscino → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: V0899

Codice EMDN: V0899

Codice BD/RDM: 2250309



Dispositivo Medico di Classe I  
*Regolamento (UE) 2017/745*



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al venditore Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902