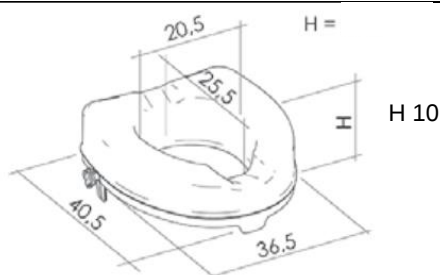


**ALZAWATER RIGIDO CON SISTEMA DI
BLOCCAGGIO H. 10 cm
(K-Design cod. AR-10-PP-12 & Albo Land cod. F0614)****Nome Prodotto**

ALZAWATER RIGIDO CON SISTEMA DI
BLOCCAGGIO H. 10 cm
(K-Design cod. AR-10-PP-12 & Albo Land cod.
F0614)

REF

AR-10-PP-12
(Albo Land cod. F0614)

Dimensioni (cm)**Destinazione d'Uso**

Progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, aumenta l'altezza del water di 10 cm; predisposto per un eventuale coperchio, viene fissato sul bordo del water in modo rapido e semplice mediante un sistema di bloccaggio laterale a vite che assicura un fissaggio stabile e sicuro, adattandosi a tutte le tipologie di water più diffuse; è realizzato in polipropilene, materiale che offre durabilità e robustezza, garantendo nel contempo una facile pulizia; la superficie della seduta è anatomicamente studiata per offrire un maggior comfort all'utilizzatore, ed una leggera inclinazione negativa che incoraggia una corretta postura. Il profilo della seduta incorpora un'apertura frontale e una posteriore che consentono una maggiore accessibilità per l'igiene personale.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Alzawater e Inserto: Polipropilene + 30% CaCO₃
Staffa: PA6+TPR® (Poliammide 6 + Thermo Poli Rock)
Vite: Poliammide
Colore Alzawater: bianco



Latex
Free



Dispositivo Non
Sterile

Istruzioni per l'Uso

Capovolgere l'alzawater ed inserire le due staffe nelle apposite guide laterali, spingere leggermente le staffe e girare le manopole in senso orario fino a che le staffe siano assicurate sull'alzawater. Posizionare le due staffe laterali nella posizione più esterna per non ostacolare l'accostamento dell'alzawater sulla ceramica del wc. Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc ed appoggiare sulla ceramica del wc l'alzawater con le staffe rivolte verso la parte posteriore del wc. Girare le manopole delle staffe in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza, assicurarsi che l'alzawater sia ben fissato al wc in senso orizzontale ovvero che non si sposti lateralmente.

ATTENZIONE! Il meccanismo di bloccaggio è stato progettato per rendere l'operazione di regolazione semplice e senza sforzo è però importante non continuare a girare la manopola qualora la staffa sia già nella posizione di contatto con il wc.

Controindicazioni e Avvertenze

Assicurarsi sempre prima dell'uso che l'alzawater sia fissato al wc.
Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.
Portata massima Kg 225 / 496 lb
Dispositivo Non Sterile.

**ALZAWATER RIGIDO CON SISTEMA DI
BLOCCAGGIO H. 10 cm
(K-Design cod. AR-10-PP-12 & Albo Land cod. F0614)****Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro. L'alzawater può essere immerso totalmente nell'acqua oppure sanificato (senza le staffe di bloccaggio) in autoclave alla temperatura di 85°C per 1 minuto.

Conservazione

Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica determina la durata di vita del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato.

Tipo di Confezione

Scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y091215

Codice BD/RDM: 1108029



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Fabbricato da: K-Design srl

Via Vincinella (località Ghiarettolo) - 19037 - S. Stefano di Magra (La Spezia) - Italy

Tel: +39 0187 1987200 Fax: +39 0187 1987229 - www.kdesign-group.com / info@kdesign-group.com



Distribuito da: Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al venditore Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902