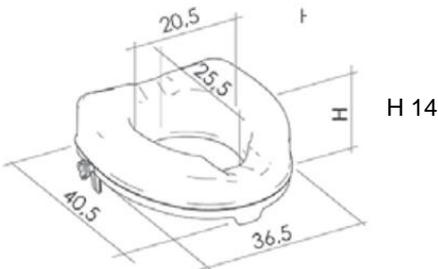


**ALZAWATER RIGIDO CON SISTEMA DI  
BLOCCAGGIO H. 14 cm  
(K-Design cod. AR-14-PP-12 & Albo Land cod. F0618)****Nome Prodotto**

ALZAWATER RIGIDO CON SISTEMA DI  
BLOCCAGGIO H. 14 cm  
(K-Design cod. AR-14-PP-12 & Albo Land cod.  
F0618)

<b>REF</b>
AR-14-PP-12 (Albo Land cod. F0618)
<b>Dimensioni (cm)</b>


**Destinazione d'Uso**

Progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, aumenta l'altezza del water di 14 cm; predisposto per un eventuale coperchio, viene fissato sul bordo del water in modo rapido e semplice mediante un sistema di bloccaggio laterale a vite che assicura un fissaggio stabile e sicuro, adattandosi a tutte le tipologie di water più diffuse; è realizzato in polipropilene, materiale che offre durabilità e robustezza, garantendo nel contempo una facile pulizia; la superficie della seduta è anatomicamente studiata per offrire un maggior comfort all'utilizzatore, ed una leggera inclinazione negativa che incoraggia una corretta postura. Il profilo della seduta incorpora un'apertura frontale e una posteriore che consentono una maggiore accessibilità per l'igiene personale.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Alzawater e Inserto: Polipropilene + 30% CaCO<sub>3</sub>  
Staffa: PA6+TPR® (Poliammide 6 + Thermo Poli Rock)  
Vite: Poliammide  
Colore Alzawater: bianco



Latex  
Free



Dispositivo Non  
Sterile

**Istruzioni per l'Uso**

Capovolgere l'alzawater ed inserire le due staffe nelle apposite guide laterali, spingere leggermente le staffe e girare le manopole in senso orario fino a che le staffe siano assicurate sull'alzawater. Posizionare le due staffe laterali nella posizione più esterna per non ostacolare l'accostamento dell'alzawater sulla ceramica del wc. Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc ed appoggiare sulla ceramica del wc l'alzawater con le staffe rivolte verso la parte posteriore del wc. Girare le manopole delle staffe in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza, assicurarsi che l'alzawater sia ben fissato al wc in senso orizzontale ovvero che non si sposti lateralmente.

ATTENZIONE! Il meccanismo di bloccaggio è stato progettato per rendere l'operazione di regolazione semplice e senza sforzo è però importante non continuare a girare la manopola qualora la staffa sia già nella posizione di contatto con il wc.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Assicurarsi sempre prima dell'uso che l'alzawater sia fissato al wc.  
Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.  
Portata massima Kg 225 / 496 lb  
Dispositivo Non Sterile.

**ALZAWATER RIGIDO CON SISTEMA DI  
BLOCCAGGIO H. 14 cm  
(K-Design cod. AR-14-PP-12 & Albo Land cod. F0618)**

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro. L'alzawater può essere immerso totalmente nell'acqua oppure sanificato (senza le staffe di bloccaggio) in autoclave alla temperatura di 85°C per 1 minuto.

**Conservazione**



Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica determina la durata di vita del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato.

**Tipo di Confezione**

Scatola di cartone.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: Y091215



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Codice BD/RDM: 1039406



Fabbricato da: K-Design srl

Via Vincinella (località Ghiarettolo) - 19037 - S. Stefano di Magra (La Spezia) - Italy

Tel: +39 0187 1987200 Fax: +39 051 19875902 - [www.kdesign-group.com](http://www.kdesign-group.com) / [info@kdesign-group.com](mailto:info@kdesign-group.com)



Distribuito da: Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al distributore Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 371877