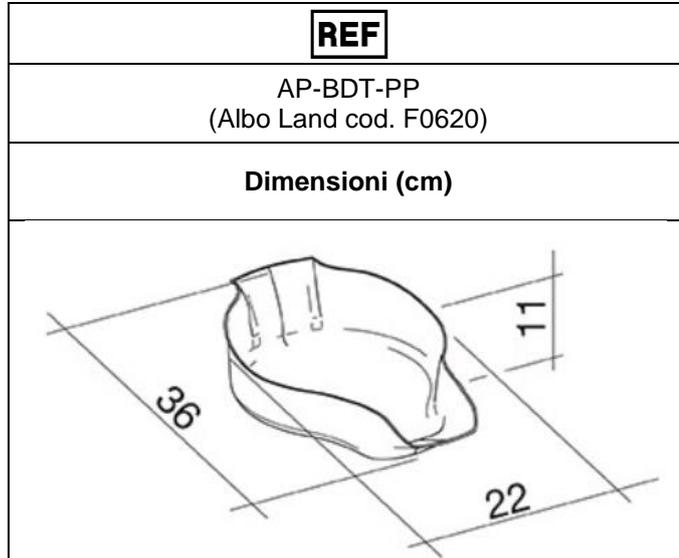


Nome Prodotto

BIDET PER ALZAWATER

(K-Design cod. AP-BDT-PP & Albo Land cod. F0620)

**Destinazione d'Uso**

Bidet portatile da usare con l'alzawater per facilitare una corretta igiene intima.

Nella parte anteriore una superficie rugosa permette di appoggiare una saponetta.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

PP (polipropilene) + 20% Talco

Colore: bianco



Latex Free



Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Riempire il bidet con acqua calda e posizionarlo nel foro dell'alzawater già installato sul wc.

Usare come un bidet normale.

Dopo aver usato il bidet scaricare semplicemente l'acqua nel wc senza rimuovere l'alzawater.

Controindicazioni e Avvertenze

Assicurarsi sempre prima dell'uso che il bidet sia appoggiato correttamente sull'alzawater.

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.

Portata massima Kg 225 / 496 lb

Dispositivo Non Sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro.

Il bidet può essere immerso totalmente nell'acqua oppure sanificato in autoclave alla temperatura di 85°C per 1 minuto.

Conservazione

Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica determina la durata di vita del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato.

Tipo di Confezione

Sacchetto di plastica. Confezione da 1 pezzo.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y093399



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Codice BD/RDM: 101985



Fabbricato da: K-Design srl

Via Vincinella (località Ghiarettolo) - 19037 - S. Stefano di Magra (La Spezia) - Italy

Tel: +39 0187 1987200 Fax: +39 0187 1987229 - www.kdesign-group.com / info@kdesign-group.com

Riconfezionamento eseguito da: Albo Land srl



Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al distributore Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902