

BASTONE PIEGHEVOLE PER NON VEDENTI
(cod. F0706)**Nome Prodotto**

BASTONE PIEGHEVOLE PER NON VEDENTI
(cod. F0706)

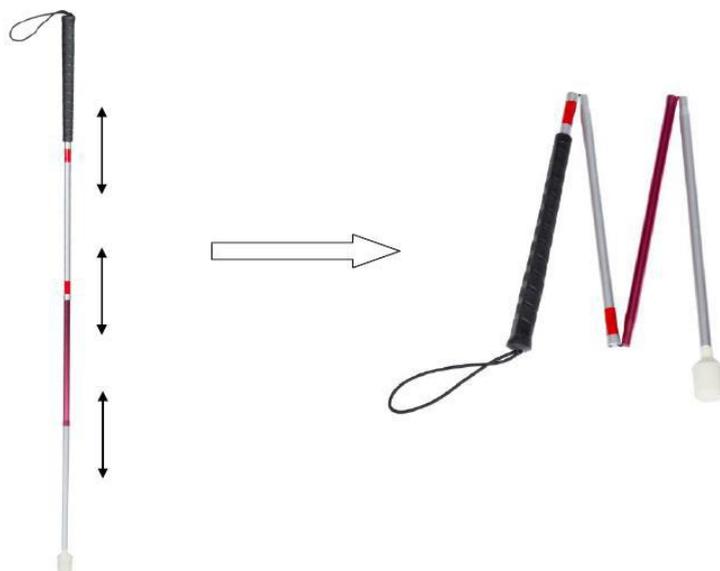
| REF | Taglia & Misure |
|-------|-----------------|
| F0706 | Unico |

Colore: Bianco e Rosso con catarifrangente

Lunghezza: 119 cm

Diametro: 13 mm

Peso Netto: 0,24 Kg

**Destinazione d'Uso**

Bastone per non vedenti pieghevole con punta a sfera. Bianco e rosso, usato dai sordo-ciechi, cioè da coloro che non possono vedere né sentire, una difficoltà in più che le persone che li circondano devono conoscere quando devono aiutarli nei movimenti. È un prodotto di supporto per la deambulazione, azionato da un braccio.

L'articolo in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Fabbricato in alluminio con impugnatura in ABS.

Pieghevole in 4 parti.

Viene fornito con cordino di fissaggio e sfera rotante all'estremità per facilitare la camminata.

Istruzioni per l'Uso e Raccomandazioni

1. Prima dell'uso è necessario verificare che si allarghi e si pieghi correttamente
2. Il bastone deve raggiungere almeno un metro davanti all'utente e può essere utilizzato con la mano destra o sinistra, a seconda di come la persona si sente più a suo agio
3. Il bastone va portato con il braccio leggermente piegato e a contatto con il corpo, esteso in avanti perpendicolarmente e nella direzione in cui viaggia
4. Permette all'utente di muoversi senza grossi disagi attraverso spazi chiusi come centri commerciali, edifici, uffici, ecc. Il bastone deve essere posizionato in diagonale, con la punta tra il muro e il terreno e senza alcun contatto. Deve solo scivolare lungo il bordo
5. Offre maggiore sicurezza quando si viaggia su terreni sconnessi o in zone rurali. Va afferrato con fermezza e, ponendolo al centro del corpo, si danno ripetuti tocchi al suolo, da un lato e dall'altro
6. Non è un bastone da passeggio sportivo. Non usarlo come bastone da trekking
7. Se la sfera terminale è usurata e non ruota facilmente, deve essere sostituita con una nuova

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

Se necessario, pulire il bastone con panno umido ed asciugare lontano da fonti di calore.

BASTONE PIEGHEVOLE PER NON VEDENTI
(cod. F0706)**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni l'articolo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita dell'articolo.

Tipo di Confezione

Confezionato in busta di finta pelle.

Smaltimento

Smaltire l'articolo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Busta di finta pelle → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Bastone pieghevole → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

L'uso, se si seguono le istruzioni e il mantenimento, è garantito per 12 mesi.

Altre Informazioni

Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Fabbricato da: Sucesores de Manuel García S.L. CIF B12321162
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com



Distribuito da: Albo Land srl
Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy
Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al distributore Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 371877