

**Nome Prodotto**“OLBIA” PANTALONE UNISEX  
(cod. F0780)

| REF   | Tessuto                     | Colore                  | Taglia              |
|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| F0780 | Tipo “A”<br>(s.c. F0780A)   | Bianco                  | dalla 38<br>alla 60 |
|       | Tipo “BX”<br>(s.c. F0780BX) | Bianco                  |                     |
|       | Tipo “CD”<br>(s.c. F0780CD) | Azzurro<br>Blu<br>Verde |                     |

**Destinazione d’Uso**

Indicato per personale sanitario e da utilizzare nel corso di procedure non chirurgiche al fine di assicurare al paziente una protezione nei confronti degli operatori.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Pantalone con tasche anteriori, cerniera e cintura con elastico.

100% COTONE SANFOR “TIPO A”       100% COTONE SANFOR “TIPO CD”       100% COTONE SANFOR “TIPO BX”

**Istruzioni per l’Uso**

Indossare come un normale capo di abbigliamento.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione.

Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Per i tessuti tipo “A” & “BX” Bianco:



Temperatura max 60°C



Candeggio possibile  
con prodotti  
contenenti cloro



Non asciugare in  
asciugatrice



Stirare fino a 150°C



Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene

Per i tessuti tipo “CD” Verde:



Temperatura max 60°C



Candeggio possibile  
con prodotti  
contenenti cloro



Non asciugare in  
asciugatrice



Stirare fino a 150°C



Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene

Per i tessuti tipo "CD" Azzurro e Blu:



Temperatura max 40°C

Candeggiamento non  
possibileNon asciugare in  
asciugatrice

Stirare fino a 150°C

Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciate, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Pantalone → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: T0205

Codice EMDN: T0205

Codice BD/RDM (F0780A): 2546632

Codice BD/RDM (F0780BX): 2546633

Codice BD/RDM (F0780CD): 2546634

Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745

Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:  
e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902