

**Nome Prodotto**

“GELA” BAVAGLINO PER  
TRACHEOTOMIZZATI (in Cotone a Jersey)  
(cod. F0871)

REF	Misura	Colore
F0871	Unica Larghezza cm.33 Lunghezza cm.21 Collarino h.3 cm	Bianco



Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Bavaglino copristoma per laringectomizzati.

Il copristoma svolge una funzione di filtraggio di corpi estranei che potrebbero penetrare, nel corso della respirazione, nelle vie respiratorie attraverso la stomia presente nel collo dei pazienti sottoposti a intervento di laringectomia.

Ripristina parzialmente l'attività di filtraggio dell'aria svolta originariamente dalla mucosa nasale; riduce l'impatto estetico della stomia.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Corpo del copristoma 100% cotone tipo Jersey

Chiusura auto agganciante 100% poliamide.

Chiusura regolabile con velcro.

**Istruzioni per l'Uso**

Indossare attorno al collo e chiudere a misura. La chiusura a velcro deve essere cucita alle due estremità dopo la regolazione. Eseguire eventuali indicazioni dal personale sanitario competente.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare nel punto in cui è cucita la chiusura a velcro.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in asciugatrice



Stirare fino a 110°C



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di polietilene.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Bavaglino → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: T0299

Codice EMDN: T0299

Codice BD/RDM: 2539883



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902