

GUANTI IN COTONE
(cod. F0881)**Nome Prodotto**
GUANTI IN COTONE
(cod. F0881)

REF	Colore	Misure
F0881	Bianco	6½ 7 7½ 8 8½ 9

**Destinazione d'Uso**

Indicati per personale sanitario e da utilizzare sotto i guanti in lattice per interventi chirurgici.

Posso essere utilizzati anche in dermatologia per forme di allergia alle mani.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o per usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% Cotone makò ed elastico in gomma al polsino.

Realizzato senza cuciture e con polsino elastico. Riutilizzabile, ambidestro.

Istruzioni per l'Uso

Infilare nelle mani come dei normali guanti.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.

Non utilizzare a contatto con pelle lesa o ferite aperte.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare con sapone per capi delicati massimo a 30°C, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Candeggio non possibile



Non asciugare in asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

GUANTI IN COTONE
(cod. F0881)

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Guanti → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: T0199

Codice EMDN: T0199

Codice BD/RDM: 2232822



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902