

MASCHERA "DONGO" PARA OCCHI IN TESSUTO
(cod. F0914)**Nome Prodotto**MASCHERA "DONGO" PARA OCCHI IN TESSUTO
(cod. F0914)

REF	Colore	Taglia
F0914	Nero	Unica

**Destinazione d'Uso**

Indicato per abbigliamento ospedaliero e sanitario per la prevenzione di possibili complicanze derivate dalle azioni dell'ambiente circostante.

Indicato anche per dare sollievo agli occhi in condizioni di luce intensa o quando si vuole riposare in ambienti luminosi.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Regolabile con elastico.

Imbottitura in MTP: 100% Poliammide (esterno) e 100% Poliuretano (interno).

Rivestimento esterno: 100% Cotone.

Istruzioni per l'Uso

Portare la patta grande sugli occhi tenerla ferma con una mano e con l'altra tirare l'elastico dietro la nuca.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione.

Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**MASCHERA “DONGO” PARA OCCHI IN TESSUTO
(cod. F0914)****Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Maschera → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: T0299

Codice EMDN: T0299

Codice BD/RDM: 2546641



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902