

**“SIENA” TUTA UNISEX A MANICA CORTA
IN MISTO COTONE
(cod. F0971E)****Nome Prodotto**“SIENA” TUTA UNISEX A MANICA CORTA IN
MISTO COTONE

REF	Taglie	Colore
F0971E	S (42/44) M (46/48) L (50/52) XL (54/56) XXL (58/60)	Azzurro

**Destinazione d'Uso**

Tuta indicata per anziani a protezione totale.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Cerniera posteriore per apertura lungo il dorso e le gambe. L'apertura completa della parte interna del pantalone fino in cintura con elastico, semplifica la vestizione e svestizione dei pazienti con mobilità articolare ridotta.

65% POLIESTERE e 35% COTONE

Istruzioni per l'Uso

Indossare come un normale capo di abbigliamento con il supporto da un operatore sanitario.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Non asciugare vicino a fonti di calore.



Temperatura max 40°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Stirare fino a 150°C

Lavare a secco con
solventi eccetto
tetracloroetilene o
percloroetilene**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilaccature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**“SIENA” TUTA UNISEX A MANICA CORTA
IN MISTO COTONE
(cod. F0971E)**

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Tuta → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: T0399

Codice EMDN: T0399

Codice BD/RDM: 2540794



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902