

**COPRIMATERASSO 1 PIAZZA E MEZZA
ANTIALLERGENICO ED ANTI-ACARI
(cod. F1001P)****Nome Prodotto**

COPRIMATERASSO 1 PIAZZA E MEZZA
ANTIALLERGENICO ED ANTI-ACARI
(cod. F1001P)

REF	Misure (cm)	Colore
F1001P	120 x 190 x 20	Bianco



Confezione da 1 pezzo.

Destinazione d'Uso

Dispositivo con funzione di coprimaterasso per alleviare allergie da acari polveri o batteri, presenti nei generici materassi da casa. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% Tessuto Evolon® (70 % PES / 30 % PA). Chiusura a Zip.

Evolon® è costituito da una MICROFIBRA prodotta in Europa, ottenuta grazie all'impiego di avanzate tecnologie, con un processo brevettato a livello internazionale.

Dalla struttura salda e compatta costituita dai microfilamenti deriva la caratteristica filtrante del prodotto. Le piccole particelle di allergeni degli acari della polvere, responsabili delle allergie, sono trattenute dalla copertura in Evolon® che ne impedisce il contatto con il soggetto allergico.

Evolon®:

- previene inoltre la formazione di funghi
- è TRASPIRANTE, quindi permeabile al vapore acqueo. L'acqua e il sudore sono assorbiti da Evolon® che asciuga molto velocemente
- è estremamente CONFORTEVOLE leggero, soffice, piacevole al tatto e drappeggiabile
- è molto RESISTENTE e non si deforma anche dopo un impiego intensivo e molteplici cicli di lavaggio in acqua
- è ECOLOGICO e non contiene leganti o solventi o PVC e non causa irritazioni cutanee da contatto

I brevetti relativi al processo di fabbricazione di Evolon® sono di proprietà di Carl Freudenberg KG - Evolon® è un marchio registrato di Carl Freudenberg KG, Germany.

Istruzioni per l'Uso

Stendere il coprimaterasso sul materasso tradizionale e successivamente stendere il lenzuolo.

Si consiglia di effettuare un lavaggio preventivo prima dell'utilizzo.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua massimo a 60°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.

**COPRIMATERASSO 1 PIAZZA E MEZZA
ANTIALLERGENICO ED ANTI-ACARI
(cod. F1001P)**



Temperatura max 60°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Utilizzare qualsiasi
solvente eccetto
tetracloroetilene

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in Sacchetto di Plastica e Busta di TNT.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Coprimerasso → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0880

Codice EMDN: V0880

Codice BD/RDM: 2550547



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902