

**“SIBARI” TUTA INVERNALE UNISEX
A MANICA LUNGA IN COTONE FELPATO
(cod. F1970F)****Nome Prodotto**

“SIBARI” TUTA INVERNALE UNISEX
A MANICA LUNGA IN COTONE FELPATO
(cod. F1970F)

REF	Taglie	Colore
F1970F	S (42/44) M (46/48) L (50/52) XL (54/56) XXL (58/60)	Azzurro

**Destinazione d'Uso**

Tuta indicata per anziani a protezione totale.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Capo a tuta, con cerniera posteriore per apertura fino al coccige.
100% COTONE FELPATO

Istruzioni per l'Uso

Indossare come un normale capo di abbigliamento con il supporto da un operatore sanitario.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Non asciugare vicino a fonti di calore.



Temperatura max 40°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Stirare fino a 150°C



Lavare a secco con
solventi eccetto
tetracloroetilene o
percloroetilene

**“SIBARI” TUTA INVERNALE UNISEX
A MANICA LUNGA IN COTONE FELPATO
(cod. F1970F)**

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Tuta → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: T0399
Codice EMDN: T0399
Codice BD/RDM: 2540798



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902