

**VELLO LANA MERINOS
CON FODERA IMPERMEABILE
(cod. F2003)****Nome Prodotto**VELLO LANA MERINOS CON FODERA
IMPERMEABILE (cod. F2003)

REF	Misure cm
F2003	70 x 100 circa

Colore: Naturale

**Destinazione d'Uso**

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito nei decorsi post operatori e nelle lunghe degenze. Tra le sue fibre, infatti, si forma un vero e proprio cuscino d'aria ideale per areare l'epidermide del paziente. Possono essere anche utilizzati da persone sofferenti per problemi ossei, artrosi, artriti, per mantenere la parte dolorante a calore costante e alleviare la sintomatologia dolorosa. Ideale per incontinenti vista la fodera impermeabile. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% Lana Merinos su supporto impermeabile in PVC telato in cotone (78% PVC e 22% Cotone).



Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Stendere il vello sulla carrozzella o sul letto fra il materasso ed il lenzuolo.
Il vello può essere anche posto a diretto contatto con il paziente.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.
Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura. Lavare in acqua tiepida, a 30°C con detersivo per capi delicati, anche in lavatrice con il programma lana, non strizzare non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore. Tenere il vello ben disteso per evitare il formarsi di pieghe. Ripassare con spazzola dura. Sono possibili numerosi lavaggi.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciate, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**VELLO LANA MERINOS
CON FODERA IMPERMEABILE
(cod. F2003)**

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Vello → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V080702

Codice EMDN: V080702

Codice BD/RDM: 2539827



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902