

**TALLONIENA-GOMITIERA A CUFFIA
IN VELLO DI MONTONE NATURALE
(cod. F2004M)**

Nome Prodotto

TALLONIENA-GOMITIERA A CUFFIA
IN VELLO DI MONTONE NATURALE
(cod. F2004M)

REF	Taglia
F2004M	Unica

Colore: Naturale

Confezione da 2 pezzi



Destinazione d'Uso

Il dispositivo previene le piaghe da decubito ai gomiti e talloni dovuti allo sfregamento continuo sulle lenzuola nei lungodegenti. Riduce gli sfregamenti e favorisce l'aerazione e prevenendo le irritazioni.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% Vello di Montone Naturale (assenza di Cromo).



Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Applicare ai gomiti e/o ai talloni regolando la tensione tramite i tiranti ed il velcro per la chiusura.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Non porre a diretto contatto con l'epidermide lesa.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida, a 30°C con detersivo per capi delicati, non strizzare non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

**TALLONIENA-GOMITIERA A CUFFIA
IN VELLO DI MONTONE NATURALE
(cod. F2004M)****Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Talloniera-Gomitiera → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0811

Codice EMDN: V0811

Codice BD/RDM: 2537955



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902