

**COPRIMATERASSO MATRIMONIALE
IN TESSUTO ALENA
(cod. F2007)****Nome Prodotto**

COPRIMATERASSO MATRIMONIALE IN
TESSUTO ALENA
(cod. F2007)

REF	Misure (cm)	Colore
F2007	165 x 190 x 20	esterno: bianco interno: blu

Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Dispositivo con funzione di coprimaterasso in caso di incontinenze e decubito. Resistente alle urine e ad altri liquidi biologici. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

53% Poliestere e 47% Poliuretano. Impermeabile, antistatico, antibatterico, antiacaro, parzialmente traspirante.

Classificazione di Reazione al Fuoco: CLASSE I.

Rapporto di prova N. 1266.0UN0180/07 alla reazione al fuoco di Classe I

Metodo prova:

- UNI 8457-UNI 8457/A1
- UNI 9174-UNI 9174/A1

Istruzioni per l'Uso

Stendere il coprimaterasso sul materasso tradizionale e successivamente stendere il lenzuolo.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua massimo a 60°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Se il caso, disinfettare con soluzione di Amuchina o di prodotti simili. Non stirare.



Temperatura max 60°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**COPRIMATERASSO MATRIMONIALE
IN TESSUTO ALENA
(cod. F2007)****Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di polietilene.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Coprimerasso → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0880

Codice EMDN: V0880

Codice BD/RDM: 2550555



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902