

**LENZUOLINO SALVA MATERASSO  
IN FOGLIA DI PVC  
(cod. F2011)****Nome Prodotto**LENZUOLINO SALVA MATERASSO IN FOGLIA PVC  
(cod. F2011)

REF	Misure	cm
F2011	S	50 x 70
	M	90 x 140
	L	130 x 140
	XL	200 x 140
	XXL	230 x 140

**Destinazione d'Uso**

Indicato in caso di incontinenza per bambini e anziani anche nei decorsi post-operatori.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Foglio di Polivinilcloruro (PVC)

Peso specifico: circa 1,35 g/cm<sup>3</sup>

Temperatura di fusione: &gt; 200 °C

Temperatura infiammabilità: &gt; 200 °C



Dispositivo Non Sterile

**Istruzioni per l'Uso**

Stendere il lenzuolino salva materasso tra il materasso e il lenzuolo.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida a 30°C con detersivo per capi delicati, non strizzare non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**LENZUOLINO SALVA MATERASSO  
IN FOGLIA DI PVC  
(cod. F2011)**

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Lenzuolino → Raccolta Plastica

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: V0808

Codice EMDN: V0808

Codice BD/RDM: 2550560



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 371877 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902