

**MATERASSO VENTILATO IN POLIURETANO
ESPANSO 3 SEZIONI
(cod. F2110)****Nome Prodotto**

MATERASSO VENTILATO IN POLIURETANO
ESPANSO 3 SEZIONI
(cod. F2110)

REF	Misure (cm)
F2110	195 x 85 x 14 (± 3%)

**Destinazione d'Uso**

Indicato per prevenire i problemi che possono insorgere dopo una lunga permanenza a letto, grazie al materiale con cui è realizzato che permette una ventilazione continua. Con medio/basso rischio antidecubito.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Poliuretano elastico indeformabile. Densità 25 kg/m³. Colore giallo. Non contiene lattice.

Altre caratteristiche:

Resistenza a compressione 40%	3,3 kpa
Resistenza affondamento	R25 (newton) 118 – R40 (newton) 142 – R65 (newton) 263
Resistenza a trazione/Carico di rottura	120 kpa
Perdita di portanza/Fatica dinamica	25%
Deformazione permanente 50%	2%
Deformazione permanente 75%	3%
Resa elastica	48%



Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Utilizzare come un normale materasso in pazienti affetti da piaghe da decubito.

Le tre sezioni possono essere tenute unite, una volta stese, da un coprimaterasso.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

**MATERASSO VENTILATO IN POLIURETANO
ESPANSO 3 SEZIONI
(cod. F2110)****Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di pulizia. Non lavare direttamente il materasso. Pulire con un panno imbevuto d'acqua, tenere lontano da fonti di calore e da radiazioni solari.



Non Lavare



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre pulito prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Il materasso col tempo può assumere un colore che vira al giallo scuro dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non incide sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

Tipo di Confezione

Imballo di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Materasso → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V080702

Codice EMDN: V080702

Codice BD/RDM: 2518783



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902