

'Nome Prodotto
CUSCINO MAX A "ELLE"
(cod. F2111)

REF	Colori
F2111	Azzurro Rosa Bianco Fantasia
Misure (± 3%)	
Lunghezza cm. 110 Larghezza cm. 27 Altezza cm. 20	



Confezione da 1 pezzo.

Destinazione d'Uso

Il cuscino è indicato per chi dorme abitualmente sul fianco; sostiene il collo avvolgendolo indicato anche per la postura dei neonati.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali


Imbottitura: 100% Fiocco in Fibra Cava. Denier: 7.0±2.0 g/9000M.

Fodera Esterna ed Interna: 65% Poliestere e 35% Cotone.

Federa con zip.

Istruzioni per l'Uso

Utilizzare come un normale cuscino.

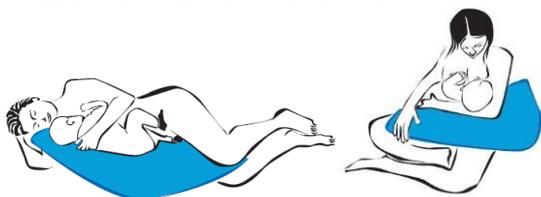

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio solo per la fodera. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura della fodera esterna. Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di polietilene e busta in TNT.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Sacchetto di plastica: Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa: Raccolta Carta

Brochure Laterale: Raccolta Carta

Busta in TNT: Raccolta Indifferenziata

Cuscino: Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V080302

Codice EMDN: V080302

Codice BD/RDM: 2553683



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902