

CUSCINO ANTIDECUBITO BARIATRICO A TRE STRATI "NETTUNO"
(cod. 500)**Nome Prodotto**

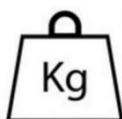
CUSCINO ANTIDECUBITO BARIATRICO A TRE STRATI "NETTUNO"

(cod. 500)

REF	Misure (± 3%)	Colore Fodera
500	50 x 50 x 13 cm	Grigio Scuro



Confezione da 1 pezzo.

**200****Destinazione d'Uso**

Il cuscino è indicato per la prevenzione e la cura delle piaghe da decubito per lungodegenti e per disabili bariatrici costretti alla carrozzina o comoda favorendone la riduzione delle pressioni. Previene quindi le piaghe da decubito per soggetti obesi. La sua anima interna, con tre strati a densità diversa, favorisce il confort della seduta oltre che al ricircolo d'aria offrendo senso di freschezza e sollievo.

Il rivestimento sfoderabile è in tessuto in poliestere traspirante e lavabile.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Anima a tre strati:

- Base inferiore (bianca) portante in poliuretano espanso di cm 6 di spessore a densità 30 kg m3 ±5%.

Resistenza a compressione	6,5 kpa
Resistenza affondamento	R25 (newton) 210 - R40 (newton) 240 - R65 (newton) 460
Resistenza a trazione/Carico di rottura	140 kpa
Perdita di portanza/Fatica dinamica	28%
Deformazione permanente 50%	2,0%
Resa elastica	44%
Tolleranze generali	± 15%

- Lastra centrale (azzurra) di cm. 4 di spessore in poliuretano espanso a densità 30 kg m3 ±5%.

Resistenza a compressione	4,2 kpa
Resistenza affondamento	R25 (newton) 145 - R40 (newton) 175 - R65 (newton) 328
Resistenza a trazione/Carico di rottura	110 kpa
Perdita di portanza/Fatica dinamica	25%
Deformazione permanente 50%	2,0%
Resa elastica	50%
Tolleranze generali	± 15%

**CUSCINO ANTIDECUBITO BARIATRICO A TRE
STRATI "NETTUNO"
(cod. 500)**

Lastra superiore (avorio) di cm. 3 di spessore in viscoelastica lenta memoria a densità netta 40 kg m³ ±5%.

Resistenza a compressione 40%	1,8 kpa → ±15%
Resistenza a trazione/Carico di rottura	70 kpa min
Indentazione 25 / 40 / 65 %	N45 / N60 / N125 → ±15%
Allungamento a rottura	160% min
Perdita di portanza/Fatica dinamica	30% max
Deformazione permanente 50%	3,50%
Deformazione permanente 75%	4,50%
Resa elastica	11%

Fodera: 100% poliestere tinto con trattamento SILVERPLUS® antisettico e HYDROCOOL® per il controllo dell'umidità. Chiusura a zip.

Il trattamento Hydrocool® garantisce una evaporazione costante:

- lo scambio di calore tra seduta e ambiente risulta efficace
- a contatto con il tessuto la pelle rimane fresca

Il trattamento Silverplus® agli ioni d'argento garantisce:

- un ottimo livello antisettico
- un elevato standard di comfort

I marchi SilverPlus® e HydroCool®, appartengono ai rispettivi proprietari.

Istruzioni per l'Uso

Usare come un normalissimo cuscino per seduta. Può essere utilizzato sia su sedia che su carrozzina.

La parte con la lastra in viscoelastico "memory" va verso l'alto.

Seguire eventuali indicazioni da parte del personale sanitario.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante. Si raccomanda di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. Si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Peso massimo dell'utente: 200 kg.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura della fodera esterna.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.

Se necessario disinfettare l'anima interna con soluzione di disinfettante specifico nebulizzato o imbevuto in un panno.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**CUSCINO ANTIDECUBITO BARIATRICO A TRE
STRATI "NETTUNO"
(cod. 500)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

L'anima interna col tempo può assumere un colore che vira al giallo scuro dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non incide sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di polietilene.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Cuscino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V08030102

Codice EMDN: V08030102

Codice BD/RDM: 2546625



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902