

**SEDUTA SAGOMATA PERIANALE A
CIAMBELLA ROTONDA CON FODERA
(cod. 265FD)****Nome Prodotto**SEDUTA SAGOMATA PERIANALE A
CIAMBELLA ROTONDA CON FODERA
(cod. 265FD)

REF	Colore
265FD	Blu
Misure ($\pm 3\%$)	
Diametro esterno cm. 42	
Diametro interno cm. 15	
Altezza cm. 10	

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per come anti-piaghe per lungodegenti e nei decorsi post-operatori.

Riduce la pressione nella zona del plesso emorroidario.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Anima: 100% Poliuretano espanso stampato a freddo.

Fodera: 100% Cotone Jersey. Chiusura a cerniera.

Istruzioni per l'Uso

Utilizzare il dispositivo su sedute di vario tipo, anche poltrone.

Si consiglia di non porla a diretto contatto con la pelle.

Controindicazioni e Avvertenze

1. Consultare il proprio Medico curante prima dell'utilizzo. Le caratteristiche che della seduta, della postura del paziente e del tempo di utilizzo contribuiscono all'utilizzo corretto del dispositivo e alla sua efficacia.
2. Non utilizzare il dispositivo a diretto contatto con la pelle, utilizzando sempre un'opportuna copertura in cotone. Per qualsiasi forma di allergia o manifestazione di dolore consultare il proprio Medico curante.
3. Non utilizzare a diretto contatto con fonti di calore o con oggetto appuntiti e/o taglienti. L'integrità del dispositivo determina la durata di vita del prodotto.
4. Effettuare una regolare pulizia del dispositivo.

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

La fodera è lavabile fino a 60°C in lavatrice anche con centrifuga. Asciugare lontano da fonti di calore. Stirare a bassa temperatura.



Temperatura max 60°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Stirare fino a 110°C



Non lavare a secco

Lavare l'anima interna a mano in acqua fredda con detersivo neutro, sciacquare ed asciugare lontano da fonti di calore.
Non mettere in lavatrice.

**SEDUTA SAGOMATA PERIANALE A
CIAMBELLA ROTONDA CON FODERA
(cod. 265FD)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

La seduta sagomata col tempo può assumere un colore che vira al giallo dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in busta di TNT.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta

Ciambella e Fodera → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V080302

Codice EMDN: V080302

Codice BD/RDM: 2795644



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902