

**PETTORALE PELVICO DI SICUREZZA
(CON OCCHIELLI)
(cod. 683POCC)****Nome Prodotto**

PETTORALE PELVICO DI SICUREZZA
(CON OCCHIELLI)
(cod. 683POCC)

REF	Misura	Colore
683POCC	Unica	Blu, Nero (secondo disponibilità)

Lunghezza totale tiranti laterali: 200 cm

Lunghezza tirante pelvico: 115 cm

Vestibilità: da 125 cm fino a 180 cm

**Destinazione d'Uso**

La cintura è indicata per pazienti costretti alla carrozzina o seduta per evitarne la caduta e lo scivolamento in avanti del bacino. Regolabile tramite i 5 occhielli di cui sono muniti i tiranti.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Chiusura con occhielli: 5 per parte.

MTP: vellutino 100% poliammide o poliestere (come da etichetta composizione), interno 100% poliuretano base etere.

Gallone: 100% cotone.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone



Necessari ma forniti a parte:

Istruzioni per l'Uso

1. Posizionare l'imbragatura sulla seduta della carrozzina o seduta facendo passare il gallone o sotto la seduta oppure tra la seduta e lo schienale.
2. Far sedere il paziente sulla carrozzina o seduta e regolare la tensione facendo coincidere i fori occhiellati.
3. Bloccare il tutto con l'apposito bottone magnetico di sicurezza.
(fornito a parte assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M).

In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**PETTORALE PELVICO DI SICUREZZA
(CON OCCHIELLI)
(cod. 683POCC)****Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Pettorale → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y122406

Codice EMDN: Y122406

Codice BD/RDM: 2518778



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902