

**IMBRAGATURA CON MUTANDA
DI SICUREZZA ANATOMICA CON OCCHIELLI
(cod. 701OCC)**

Nome Prodotto


IMBRAGATURA CON MUTANDA DI
SICUREZZA ANATOMICA CON OCCHIELLI
(cod. 701OCC)

REF	Misura	Colore
701OCC	Unica	Blu, Crema (secondo disponibilità)

Lunghezza: 300 cm

Vestibilità: fino a 120 cm

Altezza Tiranti: 5 e 3,5 cm

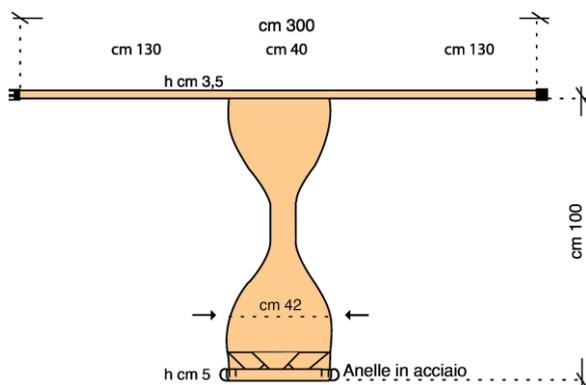

Destinazione d'Uso

L'imbragatura è indicata per pazienti costretti alla carrozzina per evitarne la caduta e lo scivolamento in avanti mantenendo la postura eretta. Regolabile tramite i 10 occhielli di cui sono muniti i tiranti.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Chiusura con occhielli: 10 per parte.

Imbottitura interna in MTP: vellutino esterno in 100% poliammide o poliestere (come da etichetta composizione) ed interno 100% poliuretano base etere.

Tiranti: 100% cotone.

Esterno: 100% cotone.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone.



Necessari ma forniti a parte:

Istruzioni per l'Uso

1. Posizionare l'imbragatura sulla seduta della carrozzina con la patta con i tiranti appoggiata allo schienale della stessa.
2. Far sedere il paziente sulla carrozzina e portare la patta con i passanti ad anello di plastica sullo stomaco.
3. Fare passare i galloni con gli occhielli all'interno dei passanti metallici ad anello, quindi regolare la tensione facendo coincidere i fori occhiellati dietro allo schienale.
4. Bloccare il tutto con l'apposito bottone magnetico di sicurezza.
(fornito a parte assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M).

In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.

**IMBRAGATURA CON MUTANDA
DI SICUREZZA ANATOMICA CON OCCHIELLI**
(cod. 701OCC)

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Imbragatura → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y122406

Codice EMDN: Y122406

Codice BD/RDM: 2795625



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902