

**TOPPER SOTTILE IMPERMEABILE PER
MATERASSO SINGOLO CON ELASTICI
(195 X 85 CM)
(cod. F2020)****Nome Prodotto**

TOPPER SOTTILE IMPERMEABILE PER
MATERASSO SINGOLO CON ELASTICI
(195 X 85 CM)
(cod. F2020)

REF	Misure (cm)
F2020	195 x 85

**Destinazione d'Uso**

Indicato per persone in caso di incontinenza o nei decorsi post-operatori. Grazie alla barriera impermeabile protegge il materasso da liquidi, umidità, macchie e usura quotidiana. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Lato superiore in maglina 100% poliestere.

Interno costituito da una mini lastra di ovatta (250 gr/m²)

Lato inferiore tessuto non tessuto (TNT) impermeabile 100% polipropilene.

Articolo dotato di elastici agli angoli per ancoraggio al materasso.



Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Stendere il topper sul materasso e fissarlo con gli elastici ai 4 angoli.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua calda fino a 60°C con detersivo per capi delicati, non strizzare non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore.



Temperatura max 60°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non strizzare



Non lavare a secco

**TOPPER SOTTILE IMPERMEABILE PER
MATERASSO SINGOLO CON ELASTICI
(195 X 85 CM)
(cod. F2020)**

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Topper → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0808

Codice EMDN: V0808

Codice BD/RDM: 2855305



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 371877 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902